

Salvavidas apto para personas con discapacidad motriz

Este salvavidas permite mantener la boca alejada del agua gracias a su cuello de flotación sobredimensionado, sin importar los movimientos que se hagan con las piernas, ya que siempre va a mantener al usuario en posición vertical. Brinda libertad e independencia y favorece la adquisición de autonomía.



Como representantes del producto nos encontramos certificados por Aquafloat, fabricantes del producto y marca Argentina con años de reconocida trayectoria.

Producto disponible en tres colores: petróleo, naranja y verde (sujeto a disponibilidad).

Características

- El cuello permite mantener la cabeza en posición recta y ayuda a estabilizar el cuerpo.
- Arnés ajustable.
- Chiripá de seguridad.
- Gran rendimiento para un espesor mínimo de flotadores.
- Escote de 10 cm de altura en el cuello que permite mantener la cabeza recta y ayuda a estabilizar la posición de la persona.
- La banda protectora suave de la barbilla retenida por velcro elimina las salpicaduras de agua.
- Ajuste de inclinación de cuatro arneses para mantener la verticalidad.

- Permite al usuario flotar sin ayuda (se indica la constante atención y cercanía de un adulto).
- Las torácicas aseguran un retorno efectivo en posición vertical: la cara no tiene contacto con el agua.
- Correa de captura de fácil acceso.
- Sin látex, fabricado con tela que repele el agua con tratamiento de fluocarbono.
- De fácil secado.
- Altura mínima de él/la usuario/a: mínima: 100 cm / máxima: 140 cm.
- Peso mínimo de él/la usuario/a: mínimo: 18 kg / Máximo: 35 kg.
- Peso total del producto: 1012 gr (aproximado).


Instrucciones de uso



Abrir el cuello para pasar la cabeza, sin tocar la cara.
Es muy importante cerrar las tiras para cerrar el cuello flotador.



Cerrar la hebilla de la cintura y ajustar el arnés.
El chiripá tienen que cubrir la parte de atrás para los hombros.

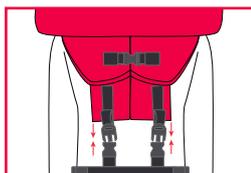

Cerrar las 2 hebillas frontales a la altura del torso.



Las 2 hebillas de la espalda permiten modificar el ángulo de las piernas para los/as pacientes.

Composición

- Espuma de polietileno con estructura de celda cerrada.
- Tela trucker resinada.
- Hebillas de resina acetal.
- Cinta de polipropileno.
- Columna de agua 500 ml.

Prueba de eficiencia

- Incline el chaleco y la cabeza hasta llevar la pera o el mentón a tocar el agua. Luego suelta el chaleco.
- Incline el chaleco y la cabeza de costado así toca el agua con el costado de la cara. Luego suelte el chaleco, aflojando la tensión.
- En todos los casos después de aflojar la tensión, el chaleco deberá poner al cuerpo en posición vertical. Luego suelte el chaleco, aflojando la tensión.
- Asegúrese que el chaleco este centrado en el cuerpo, si los hombros quedan afuera del agua, puede ser que el cuerpo sea muy liviano para esa flotación. En el caso de que un hombro quede afuera del agua no es porque es demasiado liviano, seguramente sea porque la cabeza cae para un costado entonces habría que agregar otro collar para que la cabeza quede sujeta.

ATENCIÓN

La humedad, el cloro y la exposición en los rayos del sol reducen la vida útil del chaleco salvavidas. Almacene en un lugar seco y bien ventilado. Si es necesario lavar con jabón suave. No abrir el cierre de la cremallera y sacar la espuma del estuche ya que puede dañar el chaleco.



info@outlandish.com.ar

4553-8288 / 4551-7557 / 4554-1236

Cramer 1474, Capital Federal (CP:1426) - Buenos Aires, Argentina